

BORT.
Das Plus
an Ihrer Seite.®



EasyLife®

Tabletenteiler

Einfaches Zerkleinern von Tabletten, Medikamenten und Vitaminen. Rostfrei, scharfe Klinge. Leicht zu reinigen.

Gebrauchsanleitung:

1. Tabletenteiler auf eine feste Unterlage stellen.
2. Tablette in die Mitte der zwei flexiblen v-förmigen Flügel legen.
3. Deckel mit Schwung schließen.

Vorsicht!

Enthält scharfe Klinge und sollte nicht in Kinderhände geraten.

Achtung!


Nur für Tabletten, bei denen das Teilen in der Gebrauchsinformation nicht ausdrücklich untersagt ist.

BORT GmbH
Postfach 1330, D-71367 Weinstadt
www.bort.com

Vertrieb in der Schweiz:

Orthosan AG
CH-3172 Niederwangen, Tel. 0848800333

- Ⓛ PZN 00704735
- Ⓛ PZN 3624273
- Ⓛ PhC 2176513
- Ⓛ CNK 1653-914

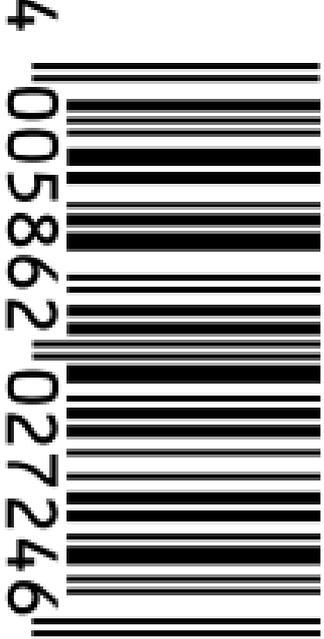

4 005862 027246

Art.-Nr. 108 040 blau

EasyLife®
Tabletenteiler 1 Stück



EasyLife®

BORT.
Das Plus
an Ihrer Seite.®



EasyLife®
Tabletenteiler
1 Stück

blau

EasyLife®



**Weitere praktische
Helfer von BORT:**



Artikel-Nr. 108 090

EasyLife®

7-Tage-Tabletten-Box

Übersichtlicher 7-Tage-Planer zur kontrollierten und sicheren Einnahme von Medikamenten und Vitaminen. Mit Blindenschrift.

Maße: 16 x 3 x 2 cm.

Farben: transparent, blau.