


zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info



Mepore[®] Pro

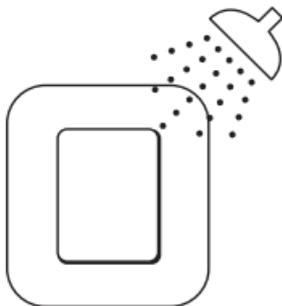

Single use
Usage unique

STERILE EO

CE 0086

EP 633 757
US 5,635,201

USA 1-800-882-4582

Canada 1-800-494-5134




MÖLNLYCKE
HEALTH CARE



Manufacturer

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden

Aktualisierung/Stand Gebrauchs.info November 2011

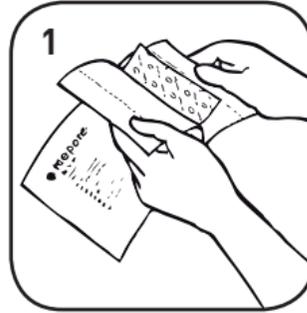

Mepore® Pro

Wasserfester, selbstklebender Absorptionsverband

Produktbeschreibung

Das Mepore Pro Wundkissen besteht aus einer absorbierenden Viskose-auflage mit einer nahezu nicht verklebenden Wundkontaktschicht. Die wasserdampfdurchlässige Folie bietet eine wasserresistente Barriere, die vor äußerer Flüssigkeitseinwirkung sowie Kontamination schützt. Gleich-zeitig wird ein Auslaufen des Wundexsudats verhindert. Mepore Pro passt sich gut den Körperkonturen an. Der Polyacrylatkleber auf Wasseremulsionsbasis ist hautverträglich und frei von Lösungsmitteln. Der klebende Bereich ist mit einer zweiteiligen Schutzfolie bedeckt und ermöglicht eine sterile Applikation.

Indikation

Mepore Pro ist für die Behandlung von leicht bis mittelstark exsudierenden Wunden, wie beispielsweise chirurgischen Wunden, Schnittverletzungen und Schürfwunden, geeignet.

Anwendungshinweise

Siehe Abbildungen:

1. Öffnen Sie die Sterilverpackung und entnehmen Sie den Verband.
2. Entfernen Sie die Schutzfolie. Platzieren Sie den Verband ohne Spannung über der Wunde.
3. Drücken Sie den haftenden Rand auf der Haut vorsichtig fest, um eine ausreichende Fixierung zu gewährleisten.
4. Den Verband während der Applikation nicht dehnen!

zur Verfügung gestellt von Gebrauch.info



Häufigkeit des Verbandwechsels

Die Verbandwechselfrequenz ist abhängig von der Wundsituation bzw. wie nach medizinischer Notwendigkeit indiziert.



Bitte beachten

Mepore Pro sollte nicht bei Patienten mit einer Überempfindlichkeit gegenüber Acrylatkleber eingesetzt werden. Besondere Vorsichtsmaßnahmen sollten beachtet werden, um mechanische Verletzungen der Haut durch Scherkräfte zu vermeiden:


1. Stellen Sie sicher, dass Mepore Pro nicht unter Spannung appliziert wird.
2. Bei der Applikation über Gelenken ist darauf zu achten, dass der Verband die Bewegung nicht einschränkt.
3. Nach chirurgischen Eingriffen kann es zu Schwellungen kommen. In solchen Fällen wird die Verwendung von flexibleren Verbänden, wie zum Beispiel Mepore Film (Polyurethan-Film), zur Minimierung von Hautspannungen empfohlen.

Nach medizinischen Standards sollte die Wunde stets auf Anzeichen von Infektionen überprüft werden. Im Fall einer Infektion (Schmerz, Rötung, Schwellung, Eiterbildung oder übermäßiger Wundabsonderung) sollte Mepore Pro nur mit Zustimmung von medizinischem Fachpersonal weiter verwendet werden.

Die Leistungsfähigkeit des Produkts kann bei wiederholter Anwendung eingeschränkt sein und es können Kreuzkontaminationen auftreten.

Darreichungsform

Jeder Verband wird steril, einzeln verpackt in einer Peelpackung angeboten.

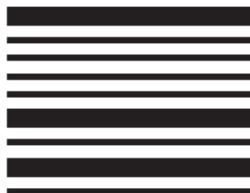

Revised 2010-06

40333-04