Gebrauchsanweisung für den Anwender



Medizinprodukt zur Pflege und Reinigung der äußeren Gehörgänge nach dem Baden, Duschen, Schwimmen oder Tauchen.

Lesen Sie bitte die gesamte Packtigeriellage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Franz Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.

Dieses Arznigel ist auch ohne Verschreibung erhältlich. Um den bestmöglichen Beharuserfolg zu erzielen, muss Dolphiner vorschriftsmäßig angewendet werden

Eigenschaften:

DOLPHINER™ Ohrenspray dient der Reinigung und der Pflege der äußeren Gehörgänge bei Kindern (ab 2. Lebensjahr) und Erwachsenen

DOLPHINER™ unterstützt die Wiederherstellung des physiologischen pH-Wertes und des Säureschutzmantels der äußeren Gehörgänge

DOLPHINER™ kann das Wachstum gefährlicher Bakterien, Pilze oder anderer entzündlicher Prozesse verhindern

DOLPHINER™ sollte immer nach längerem Tragen von Ohrstöpseln, Kopfhörern oder Hörgeräten angewandt werden Zeichtung.1

DOLPHINER™ ist empfohlen zur Anwendung vor und nach dem Schwimmen oder anderen Arten von Wassersport wie Tauchen, Windsurfing, Kitesurfing, etc.

Hinweise zur Anwendung

Vor dem ersten Gebrauch, drücken Sie bitte den Applikator 2 – 3 mal, um Luft aus dem System zu verdrängen (Zeichnung 1).



Art der Anwendung

Empfohlen ist die Anwendung von 1-2 Sprühstößen für jedes Ohr vor und nach jedem Aufenthalt im Wasser oder nach entfernen eines Hörgerätes oder Ähnlichem.

Vor der Verwendung sollte DOLPHINER™ kurz geschüttelt und einige Zeit in der Hand erwärmt werden. Halten sie den Sprühkopf aufrecht und unmittelbar vor den Gehörgang.

Wichtig: Um Verletzungen zu vermeiden, sollte der Applikator nicht in den Gehörgang gesteckt werden.

Nach dem Sprühvorgang ausfließende Flüssigkeit mit einem Tuch abwischen

Gegenanzeigen

Überempfindlichkeit gegen Inhaltsstoffe von DOLPHINER™

Warnhinweise

- DOLPHINER™ stets verschlossen und für Kinder außerhalb der Reichund Sichtweite aufbewahren
- · Kontakt mit Mund und Augen vermeiden
- Bei Ohrenschmerzen unbedingt ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen
- Nicht anwenden bei perforiertem Trommelfell
- DOLPHINER™ ist entzündlich, nicht in eine offene Flamme sprühen

Zusätzliche Informationen

DOLPHINER™ immer in einer aufrechten Position und nicht über 25°C lagern DOLPHINER™ ist ausschließlich zur persönlichen Anwendung gedacht DOLPHINER™ nicht nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums verwenden DOLPHINER™ innerhalb von 3 Monaten nach Öffnen der Packung verwenden DOLPHINER™ist ein Medizinprodukt der Klasse I gemäß der europäischen Richtlinie 93/42/EWG

Bestandteile: Isopropylalkohol, Glycerin, Essigsäure, Pfefferminzöl

Packungsgrösse: Glasfläschchen mit 15ml Inhalt

Hersteller: Axpharm Ltd., ul. Kozietulski 36, 85-657 Bydgoszcz Poland Vertrieb (D, A, CH):
Biobridge Europe GmbH
Zu den Eichen 5
D – 16727 Oberkrämer. Deutschland

Stand der Informationen 15.05.2013

